



довжиною  
**1, 1,5, 2, 3, 4, 5**  
м(м)

# БИ НТ

МЕДИЧНИЙ  
ЕЛАСТИЧНИЙ  
СТРІЧКОВИЙ  
З ТЕКСТИЛЬНОЮ  
ЗАСТІБКОЮ  
СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ

шириною  
**8**  
см(см)



# АСОРТИМЕНТ



довжиною  
**1, 1,5, 2**  
м(м)



шириною  
**8**  
см(см)



# АСОРТИМЕНТ



довжиною  
**3, 4, 5**  
м(м)

шириною  
**8**  
см(см)



## Бинт еластичний стрічковий з текстильною застібкою середньої розтяжності

Опис: еластичний бинт з текстильною застібкою виготовлений зі спеціальної тканини високої поверхневої щільності та підвищеним вмістом бавовни. Спеціальна технологія ткацтва, що застосовується при виробництві бинта, забезпечує відмінну якість і збереження властивостей навіть при тривалому та інтенсивному використанні.

Зручна текстильна застібка на липучці «Velcro» дозволяє легко накласти пов'язку і закріпити її без додаткових кріплень.

Застібка «Velcro» - це комплект з двох стрічок, виготовлених з нейлону. На одній стрічці розташовані мікрогачки з міцної нейлонової нитки, а на другій - мікропетлі у вигляді ворсисті частини. При використанні вони прилипають одна до іншої та утворюють якісне зчеплення.

Бинт медичний еластичний стрічковий з текстильною застібкою середньої розтяжності – це чудова альтернатива дорогим спортивним бинтам та покращена версія класичного еластичного бинта.

Призначення: Профілактика й лікування варикозного розширення вен, хронічних тромбофлебітів, вивихів, розтягнень і т. п. З профілактичною метою - для рятування від перевантажень і перевтоми при фізичних навантаженнях, для запобігання розтягненням м'язів і травм, пов'язаних із заняттям спортом.

Склад виробу                      Бавовна, латекс, поліефір

Термін зберігання                5 років

Нормативний документ ТУ У 32.5-38935759-004 діє до: 2014

Текстильна ліпучка                1 шт.



Назва	Розмір	Кількість в уп.
Бинт медичний еластичний стрічковий з текстильною застібкою середньої розтяжності	8 см $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ м} \\ 1,5 \text{ м} \\ 2 \text{ м} \\ 3 \text{ м} \\ 4 \text{ м} \\ 5 \text{ м} \end{array} \right.$	1



## ОПИС ВИРОБА

Бинт медичний  
еластичний стрічковий  
с текстильною  
застібкою.

Кількість 1 шт.




## ПРИМІТКА



Бинт складений навпіл



Складений навпіл бинт згорнутий в ролік для зручності в подальшому використанні ( при намотуванні на тіло, запобігає волочіння кінцівки бинта по долозі )

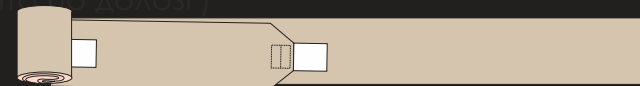


Текстильна застібка знаходиться в середині згорнутого ролика





# ПЕРЕВАГИ

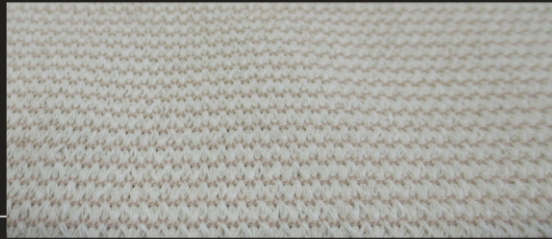

ВИСОКА ПОВЕРХНЕВА  
ЩІЛЬНІСТЬ



ПІДВИЩЕНИЙ ВМІСТ  
БАВОВНИ




ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИ  
ІНТЕНСИВНОМУ  
ВИКОРИСТАННІ



ЗРУЧНА ТЕКСТИЛЬНА  
ЗАСТІБКА




ЛЕГКЕ ВИКОРИСТАННЯ

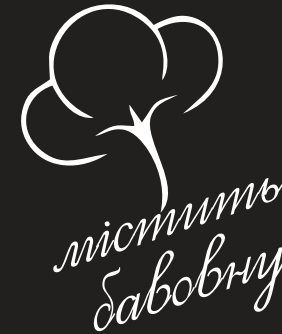

## ПОКАЗАННЯ

- ✓ Профілактика й лікування варикозного розширення вен, хронічних тромбофлебітів, вивихів, розтягнень і т. п.
- ✓ З профілактичною метою - для рятування від перевантажень і перевтоми при фізичних навантаженнях, для запобігання розтягненням м'язів і травм, пов'язаних із заняттям спортом.

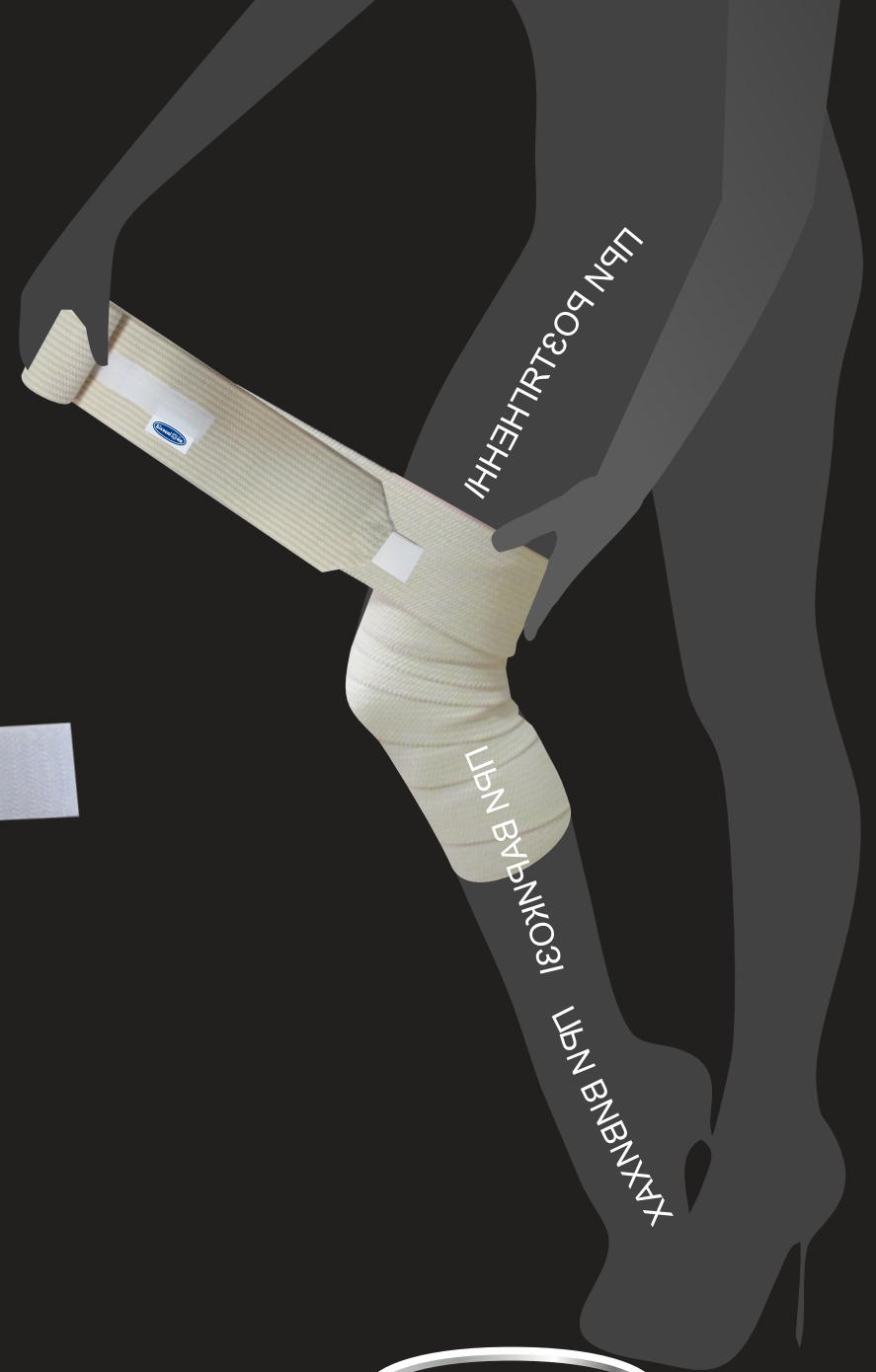

## ЕЛАСТИЧНІ ВИРОБИ

Повнота / унікальність  
асортименту

### Бинти еластичні

---

Усього позицій  
на ринку (SKU) 54


Асортимент  
«Білосніжка» 42

Унікальні  
позиції  
«Білосніжка» 6



Частка  
на ринку України  
еластичної групи  
«Білосніжка»

23%

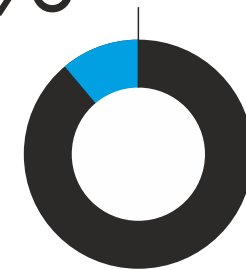

Підготовлено за даними  
аналітичної компанії SMD





# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

## БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ

**Призначення:** Бинт медичний еластичний стрічковий з текстильною застібкою призначений для профілактики, оздоровлення й лікування варикозного розширення вен, хронічних тромбофлебітів, підтримки суглобів і м'яких тканин у спокої після травм і операцій.

**Показання:** Профілактика й лікування варикозного розширення вен, хронічних тромбофлебітів, вивихів, розтягнень і т. п. З профілактичною метою - для рятування від перевантажень і перевтоми при фізичних навантаженнях, для запобігання розтягненням м'язів і травм, пов'язаних із заняттям спортом.



**Методика застосування:** Проконсультуватися з лікарем з питань використання бинта. Накладати бинт відповідно до запропонованої схеми бинтування або за схемою рекомендованою лікарем.

Бинт складений в ролик текстильною застібкою всередину, що дозволяє відразу обертати бинт в ролик навколо кінцівки, попередньо не розмотуючи його перед використанням.

**Самолікування може бути шкідливим для Вашого здоров'я.**

### Схема бинтування при варикозній хворобі

1. Перед бинтуванням полежіть, піднявши ноги, 5-10 min(хв); ногу, яку бинтуватимете, залишіть підведеною.
2. Бинт накладається на стопу від кісточки до початку пальців; потім знизу вгору бинтують гомілку та стегно.
3. Кожен тур бинта накладається із перекриттям попереднього туру на 50-70%.
4. Найбільший натяг бинта – в області кісточки, поступово зменшуйте його до верху ноги.
5. Обов'язкове бинтування п'ятки та формування так званого «замку», що виключає зісковзування бинта при ходьбі.
6. Останній тур бинта повинен бути на 5 - 10 см(см) вище ураженої венозної ділянки; кінець бинта фіксується текстильною застібкою. При правильному накладанні бинта кінчики пальців у спокої трохи синіють, а після початку руху їх колір нормалізується. Після накладання еластичного бинта пацієнту рекомендується тренувальна ходьба протягом 20-30 min(хв).

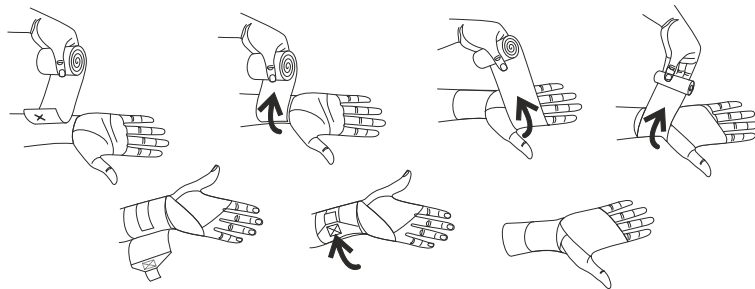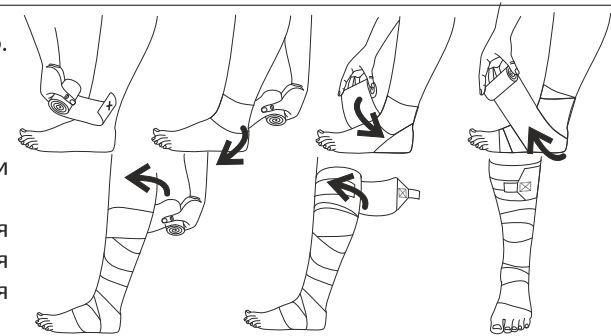

### Схема бинтування області променево-зап'ясткового суглоба

1. Обмотуємо повне коло, починаючи з внутрішньої сторони зап'ястя.
2. Обертаємо по діагоналі донизу через зовнішню сторону руки між великим та вказівним пальцями, та через долоню назад до зап'ястя.
3. Обмотуємо бинт навкруги зап'ястя та далі донизу через долоню, а потім навкруги зовнішньої сторони між великим та вказівним пальцями, та назад до долоні. Обмотуємо зап'ястя. Робимо також другий повний оборот «вісімкаю».
4. Обмотуємо зап'ястя та починаємо робити кругові оберти вгору по руці, частково покриваючи половину попереднього шару. Закріпіть бинт над зап'ястям текстильною застібкою.

**Протипоказання:** Індивідуальна чутливість до компонентів сировини, що може викликати алергію.

**Санітарно-гігієнічна обробка:** Бинт еластичний слід прати в мильному розчині при температурі не більш +35°C без використання засобів, що містять відбілювачі. Після цього добре прополоскати в теплій воді. Не застосовувати синтетичні мийні засоби. Рекомендується акуратне віджимання без викручування. Бинти сушити в розправленому вигляді. Заборонено прасувати.

**Умови зберігання:** Зберігати при температурі від +5°C до +40°C та відносній вологості не більше 80%. Зберігати у недоступному для дітей місці.



ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ». Україна, 18018, м. Черкаси, вул. М. Залізняка, 165А.  
Т.: (0472) 64-40-58. E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua



ДЯКУЄМО  
ЗА УВАГУ

Виробник: ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ».  
Україна, 18018, м. Черкаси, вул. М. Залізняка, 165А. Т.: (0472) 64-40-58. E-mail: [info@ukrmedtextile.com.ua](mailto:info@ukrmedtextile.com.ua);