

ІНСТРУКЦІЯ  
щодо застосування засобу  
**Гель для швидкого загоєння ран**  
**«HEALER GEL»**

**Загальна характеристика:**

**склад:** полігексаметиленбігуанідин гідрохлорид (ПГМБ-ГХ) – 0,5% (діюча речовина); функціональні компоненти та емоменти – 0,1; вода до 100,0%;

**форма випуску та основні фізико-хімічні властивості:** готовий до застосування прозорий гель безбарвного або жовтуватого кольору без запаху.

**Фармакологічна група:** Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

**Спектр антимікробної дії:** Засіб володіє бактерицидною (по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій), віруліцидною та фунгіцидною дією (включаючи збудників дерматомікозів *Microsporum*, *Epidermophyton*, *Trichophyton*, кандидозів); високоактивний проти резистентних форм мікроорганізмів.

**Дія засобу спрямована на інактивацию існуючих мікроорганізмів ранової поверхні та на затримку їх розмноження при повторному інфікуванні.**

Функціональні допоміжні речовини зумовлюють виражену місцеву протизапальовальну та ранозагоюючу дію, знімають набряк, свербіж, пом'якшують шкіру, забезпечують її зволоження та еластичність, зберігають нейтральний рН шкіри. Засіб не містить спирту.

Показання до застосування: Засіб «HEALER GEL» використовується з метою:

- антисептичної обробки ран та різних ушкоджень шкірних покривів;
- профілактики вторинного інфікування ранової поверхні мікрофлорою;
- очищення рани від некротичних тканин, продуктів життєдіяльності мікроорганізмів;
- прискорення регенерації, епітелізації тканин рани, швидкого загоєння та зменшення ризику утворення рубців;
- надання тканинним перев'язувальним матеріалам антисептичних властивостей для захисту ран від інфікування.

**Спосіб застосування:**

1. Рану очистити від некротичних тканин та фібрину (рекомендовано застосовувати антисептик «ХІЛЕР-С/HEALER-С»).
2. Засіб «HEALER GEL» нанести на ушкоджену ділянку за допомогою дозатора, намагаючись покрити шаром гелю всю ранову поверхню.
3. Поверх шару гелю накласти стерильні серветки або інший стерильний перев'язувальний матеріал.
4. При наступній перев'язці, антисептик «ХІЛЕР-С/HEALER-С» може бути використаний для зволоження поверхні перев'язувального матеріалу та зниження травматичності зняття пов'язки.

**Безпечність засобу:** Засіб «HEALER GEL» не леткий, не подразнює слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очей. Засіб не володіє подразнюючою, шкірно-резорбтивною, сенсibiliзуючою та кумулятивною дією; ембріотоксичні, канцерогенні, мутагенні і тератогенні властивості відсутні. Засіб екологічно безпечний.

**Особливості застосування:** Не застосовувати особам, які мають підвищену чутливість до компонентів засобу. Засіб використовують тільки для зовнішнього застосування.

**Пакування:** Випускається у полімерних флаконах об'ємом 60 мл з дозатором. Форма випуску засобу оптимальна для використання в аптечках першої допомоги.

**Термін придатності та умови зберігання:** 36 місяців від дати виготовлення за умови зберігання в оригінальному пакуванні виробника у закритих приміщеннях при температурі від 2°C до 45°C. Засіб зберігати в недоступному для дітей місці.

**Затверджено МОЗ України:** Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-5/5266 від 17.03.2017р.